

PiezoWave² **НОВИНКА**

Новые возможности с прежним безупречным качеством

ТРАВМАТОЛОГИЯ

ОРТОПЕДИЯ

ФИЗИОТЕРАПИЯ

**СПОРТИВНАЯ
МЕДИЦИНА**

РЕАБИЛИТАЦИЯ


УРОЛОГИЯ



САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ



Максимальная энергия **сфокусированной ударной волны с высокой энергией** направляется прямо в зону терапии

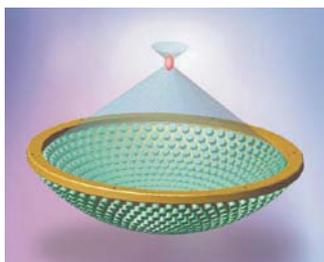

Мозаичное расположение пьезоэлементов на источнике терапии PiezoWave



При активации высоковольтным импульсом цилиндрические пьезоэлементы за короткий промежуток времени увеличиваются в размерах на несколько микрометров вдоль своей оси



Планшетный ПК не входит в комплект

Пьезоэлектрическая ударно-волновая терапия открывает новые горизонты

- Высокая эффективность, благодаря сочетанию трех видов ударной волны
- Возможность использования сфокусированной, линейной и плоской ударной волны в одном приборе - лучший вариант для клинического применения
- Технология пьезоэлектрического «прямого фокуса» - точно направленное терапевтическое воздействие - блестящая дополнительная возможность для диагностики и лечения триггерных зон
- Чрезвычайно долговечный сфокусированный источник терапии
- Независимо регулируемые глубина проникновения и уровни энергии
- Широкий диапазон параметров энергии - позволяет безопасно и комфортно для пациента проводить процедуру, а также добиваться хороших клинических результатов со стойкой ремиссией.
- Легкая работа с поддержкой программного обеспечения и держателем для iPad
- Быстрое распознавание источника терапии благодаря технологии Plug&Play
- Наличии металлоконструкций и эндопротезов не являются противопоказанием для пьезоэлектрической ударно- волной терапии.
- Новые возможности пьезоэлектрической ударной волны в лечении трофических ран.

The PiezoWave²

Сфокусированная, линейная и плоская ударно-волновая терапия в одном аппарате

Принцип пьезоэлектрической ударной волны предлагает широкий спектр конфигураций ударной волны. Единственный в своем роде аппарат PiezoWave² позволяет пользователям выбирать между традиционной сфокусированной ударной волной, линейной сфокусированной ударной волной и плоской волной давления. Для каждого клинического случая свой режим ударной волны.

Сфокусированная ударная волна

Сфокусированный источник терапии аппарата PiezoWave² имеет строго определенную и точную зону фокусировки. Идеально подходит для ЭУВТ и диагностики. Гарантированный срок службы — 5 миллионов импульсов, что является непревзойденным результатом.



Новые горизонты в лечении и диагностике

Линейная ударная волна

Открывая новые горизонты в области ударно-волновой терапии. Уникальное линейное выравнивание пьезокристаллов вдоль ширины источника терапии обеспечивает более широкую площадь ударно-волновой терапии.



Плоская волна давления

Пьезоэлементы плоского источника терапии не выравниваются в направлении определенной области фокусировки. Вместо этого создается несфокусированная волна давления, которая особенно подходит для улучшения местного кровообращения и метаболизма.




The PiezoWave² ВСЕГДА В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Аппарат PiezoWave2 имеет улучшенный пользовательский интерфейс, который делает повседневное использование аппарата простым и удобным. Распознавание источника терапии с помощью технологии Plug&Play. В вашем распоряжении также наше дополнительное приложение ESWT для iPad. Благодаря новому подходу к поддержке пользователей, реализованному через данное приложение, мы гарантируем, что в дальнейшем вы с помощью Интернет сможете быстро и легко получать самую свежую информацию о настройках и последних рекомендациях по клиническому применению аппарата PiezoWave2.



- Распознавание источника терапии с помощью технологии Plug&Play
- Простота в использовании — простота в управлении
- Быстрый запуск терапии
- Поддержка с помощью приложения ESWT для iPad
- Использование внешних дополнительных приложений
- Всегда в ногу со временем

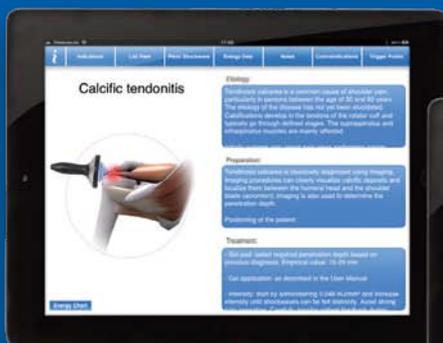

Идея чилфяеимйюя
Идея чилфяеимйюя
Идея чилфяеимйюя